

# INSTRUÇÕES PARA ESTERILIZAÇÃO DE GUIAS CIRÚRGICAS DA ADITIV

(DISPOSITIVOS SEMICRÍTICOS DE USO ÚNICO)

1 - Não expor o dispositivo a temperaturas superiores a 45°C

2 - Sempre utilize máscara, óculos de proteção, luvas e avental para manipulação

3 - Remover o dispositivo **semicrítico de uso único** da embalagem original e imergi-lo completamente no líquido de **desinfecção de alto nível** (recomenda-se soluções à base de ácido peracético/peróxido de hidrogênio)


4 - Deixar agir pelo tempo recomendado de acordo com o fabricante da solução e enxaguar com soro estéril em abundância

5 - Utilizar imediatamente o dispositivo **semicrítico de uso único** no campo operatório e descartá-lo da forma apropriada

RESOLUÇÃO ANVISA - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012

XVI - produtos para saúde semicríticos: produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas

Art. 12 Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.

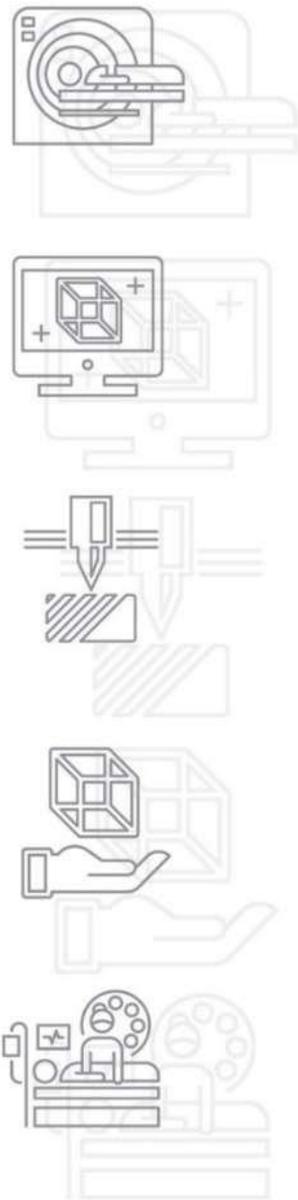

aditiv\_lab



@aditivlab



(21) 99510-3151



contato@aditiv.com.br

